

Laboratoire de biologie médicale Pau - Oloron - Orthez	FICHE TECHNIQUE Utilisation des seringues à gaz du sang Radiometer Self Fill	VISKALI Version 1 / 2023 Page 1 / 1
---	---	--

Recommandations préanalytiques pour le prélèvement d'un gaz du sang en artériel


Seringue Radiometer SafePICO Self-fill




Retirer le bouchon de purge *safeTIPCAP*.

Pré-positionner le piston de la seringue en fonction du volume de sang à prélever.

Mettre une aiguille et piquer à 45° ou connecter la seringue au montage en tenant le piston orienté vers le haut.

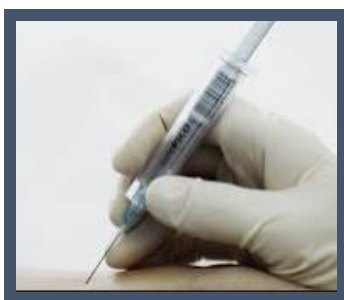

La pression artérielle remplira automatiquement la seringue lors du prélèvement.

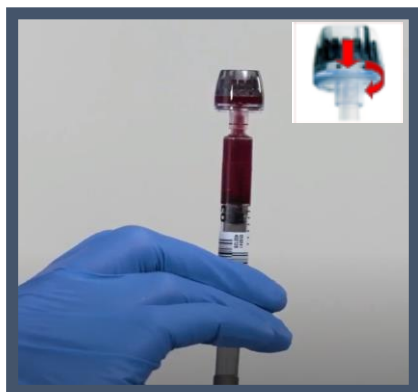

Placer le **BOUCHON** sur le lueur et tourner le d'1/4 de tour afin d'assurer l'étanchéité avec le corps de la seringue



Déloger les **BULLES D'AIR** en tapotant sur le corps de la seringue



PURGER dans le bouchon (pas de compresse)

Appuyer doucement sur le piston jusqu'à sentir une butée



HOMOGENISER le prélèvement par retournements afin d'éviter la formation de caillots

Identifier le prélèvement

Valider le prélèvement dans Crossway
ou indiquer sur le bon : Nom du préleveur et
Heure de prélèvement

Acheminement au laboratoire **< 30 min**
Température ambiante