

<p>Laboratoire de biologie médicale</p> <p>Pau - Oloron - Orthez</p>	<p>FICHE TECHNIQUE</p> <p>Utilisation des seringues à gaz du sang Radiometer Aspirator</p>	<p>VISKALI</p> <p>Version 1 / 2023</p> <p>Page 1 / 1</p>
--	--	--

Recommandations préanalytiques pour le prélèvement d'un gaz du sang en artériel

Seringue Radiometer SafePICO Aspirator



Retirer le bouchon de purge *safeTIPCAP*.



Appuyer sur le piston pour
expulser l'excès d'air



Prélever jusqu'à 1mL de
sang par aspiration



Placer le **BOUCHON** sur le
lueur et tourner le d'1/4 de
tour afin d'assurer l'étanchéité
avec le corps de la seringue



Déloger les **BULLES D'AIR**
en tapotant sur le corps de la
seringue



PURGER dans le bouchon
(pas de compresse)
Appuyer doucement sur le
piston jusqu'à sentir une
butée



HOMOGENISER le prélèvement
par retournements afin d'éviter la
formation de caillots

Identifier le prélèvement
Valider le prélèvement dans Crossway
ou indiquer sur le bon : Nom du préleveur et
Heure de prélèvement

Acheminement au laboratoire < **30 min**
Température ambiante